

**DAS INNOVATIVE  
CORONA TESTVERFAHREN  
VON LEAD HORIZON**



# Unsere Produkte

LEAD Horizon entwickelt innovative und patentierte Selbst-Test-Sets zur Ermittlung von COVID-19. Diese Produkte werden dabei ausschließlich durch offiziell von den Behörden anerkannte PCR-Testverfahren durch Partnerlabore ausgewertet. Die Test-Sets sind schmerzfrei, sicher und einfach anzuwenden, innerhalb von 24 Stunden nach Einlangen im Labor werden die Ergebnisse digital zugestellt.



## Test-Set für den Einzelhandel

- **Privatpersonen**

Dieses Test-Set wurde speziell für Privatpersonen entwickelt, um die Heimtestung einfach zu gestalten. Dabei werden größere Komponenten sowie unterstützende Inhalte (wie z.B. eine Handyhalterung) verwendet.

## Test-Set für Screening Testungen

- **für Unternehmen bzw. Massentestungen**

Die Komponenten des Screening Tests sind ausgelegt auf Massentestungen. Hier ist die zu produzierende Stückanzahl viel höher und die Produktion muss wesentlich schneller abgewickelt werden.

# Die LEAD Horizon WebApp

Unsere WebApp ist einzigartig in der Anwendung und in zehn verschiedenen Sprachen verfügbar.

**Angaben zu Ihrer Person**

Diese Daten müssen erfasst werden, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Ohne diesen Angaben, können wir Ihnen kein Ergebnis liefern.

**Name \***

Vorname

Nachname

**Geschlecht \***

Männlich  Weiblich  Divers

**Mobil-Nummer \***

06601234567

**Geburtsdatum \***

TT . MM . JJJJ

LEAD HORIZON


Willkommen zu Ihrem Corona Test!

Wählen Sie eine Sprache

- Deutsch
- Englisch
- Portugiesisch
- Spanisch
- Slovakisch
- Bulgarisch
- Rumänisch
- Ungarisch
- Kroatisch
- Türkisch

Die Datenerfassung erfolgt selbstständig, ohne Hilfe von medizinischem Personal.

Die Möglichkeit eines Identitätsnachweises ist durch Scannen des Reisepasses oder Personalausweises möglich aber nicht verpflichtend. Bei Durchführung des Identitätsnachweises erhält der Getestete zusätzlich ein Zertifikat mit seinen persönlichen Daten sowie dem Identitätsnachweis.

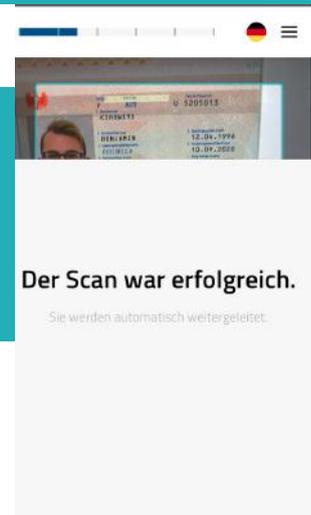

LEAD HORIZON

Herzlich Willkommen Carina.

NEUEN TEST DURCHFÜHREN

Ihre Testergebnisse der letzten 14 Tage:

04.02.2021	negative
08.02.2021	negative
16.02.2021	negative

OFF

Erinnerungsservice

Mit dem Erinnerungsservice erhalten Sie d... und sieben Tage nach Ihrem letzten Test ei...

Falls die Anwendung regelmäßig erfolgen soll, gibt es die Möglichkeit, sich ein Nutzerprofil anzulegen.

Dieses hat den Vorteil, dass persönliche Daten bei jeder Testung nicht erneut eingegeben werden müssen. Die persönliche Test-Historie der Ergebnisse der letzten 14 Tage wird im Profil aufgelistet.

Der gesamte Prozess wird anschließend Schritt für Schritt in der WebApp erklärt.



## Anleitung zum Spülprozess

Bitte führen Sie die nachfolgenden Schritte aus:

- 1 Bitte stecken Sie das Probenröhrchen (2) in die dafür vorgesehene Halterung (7).
- 2 Nehmen Sie die Salzlösung in den Mund und spülen Sie bei geschlossenem Mund 1 Minute gründlich durch.
- 3 Füllen Sie die Lösung mit dem Transferröhrchen (4) in das Probenröhrchen (2).
- 4 Verschließen Sie das Probenröhrchen mit der roten Kappe und kleben Sie einen der beiden Siegelsticker (6) seitlich über den Verschluss.

Füllen Sie jetzt die Flüssigkeit mit dem Transferröhrchen (4) in das Probenröhrchen (2). Verschließen Sie das Probenröhrchen mit der roten Kappe und kleben Sie einen Siegelsticker (6) seitlich über den Verschluss.



NÄCHSTER SCHRITT

## Test-Set versenden (2/2)

Bitte senden Sie Ihr Test-Set gut verschlossen an folgende Adresse:

Lifebrain Labor  
Baumgartner Höhe 1 / Pavillon 17  
1140 Wien  
Beschriften Sie dafür ein weißes Blatt und überkleben Sie das Adressfeld auf der Rückseite Ihres Test-Sets.

Sollten Sie das Test-Set persönlich abgeben wollen, so können Sie dies bei diesen Adresse:

Lifebrain Labor Wien West Frachtenbahnhof  
Felberstraße 3  
1150 Wien  
Öffnungszeiten Mo-So 8-18 Uhr

Je nach Land bzw. Standort werden die Informationen zur Retournierung der Proben ins Labor in der WebApp angeführt.

24 Std. ab Einlangen im Labor werden Getestete über das Vorliegen der Ergebnisse informiert. Diese können in der WebApp abgerufen werden. Zusätzlich können medizinische Befunde über ein Befundportal der Partnerlabore abgerufen werden.

**Certificate**  
Verification SARS-CoV-2 by means of PCR  
Page 1 of 1

Code number: LMA00042108  
Date of sample collection: 01.02.2021 10:36  
Valid until: 04.02.2021 18:56  
Date of test result: 01.02.2021 22:04

Primary Sample:  
Mouth wash liquid

Angela Hergsbarger  
1999  
Identification / ID Card

LMHergsbarger  
MPL5001302  
991

**LABORATORY REPORT**  
Vienna, 01.02.2021

P: Angela Hergsbarger  
F: Female  
IDCARD: 1999  
Exp/lim: 01.02.2021 11:01  
entry: 01.02.2021 11:00  
number: L21020101542  
acc No: 1

ular Diagnostics  
lab: google  
test of analysis: PCR  
COVID-19-IG  
negative

**TEST RESULT LABORATORY SARS-COV-2**  
TESTPERSON IS **NEGATIVE**

General information  
This certificate serves only as information and is NO medical certificate. For an official medical certificate please contact us.

COVID-19

**Ihr Testergebnis**

**Negativ**

Es konnte keine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen werden.

ERGEBNIS HERUNTERLADEN

BEFUND ANFRAGEN

TestFRWD Event Pass anzeigen

Dr. Mathias Müller  
Ärztliche Laborleitung

Unsere WebApp verfügt über alle herkömmlichen Schnittstellen zu Laboren. Dazu zählen RestAPI, CSV, FSTP. Alle wichtigen personenbezogenen Daten für die Einmeldung in die nationalen Meldesysteme werden erhoben.